

SARS Cov-2 抗原定量				2432000
SARS Cov-2 Q				担当部署 生化
検査オーダー				
患者同意に関する要求事項		特記事項なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*16.コロナ関連→		
	2			
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報		特記事項なし		
検査受付時間		8 : 15~16 : 00(平日) 8 : 15~12 : 00(休日)		
検体採取・搬送・保存				
患者の事前準備事項		特記事項なし		
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし		
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1	鼻咽頭拭い液	COVID PCR	PBS	1 本
2	鼻咽頭拭い液	COVID PCR	生理食塩水	1 本
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
検体搬送条件		室温		
検体受入不可基準		1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体		
保管検体の保存期間		当日 : 2-8℃ -80℃3 日間		
検査結果・報告				

検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部				
測定時間		当日中～翌日				
生物学的基準範囲		設定なし				
臨床判断値		陰性： 1.0 pg/mL 未満 陽性： 1.0 pg/mL 以上 AIA-パック CL SARS-COV-2-Ag 添付文書				
基準値					単位	pg/mL
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
0	0.9	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値	高値	設定なし				
	低値	設定なし				
生理的変動要因		特記事項なし				
臨床的意義		SARS-CoV-2 感染の診断補助				