

第Ⅷ因子インヒビター				278000	
				担当部署	
F8 inhib				血液	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項			特記事項なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→血液学→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		ループスアンチコアグラント（抗リン脂質抗体）によっても凝固時間が阻害され検査値に影響を与えるので注意が必要である。			
検査受付時間		8 : 15～16 : 00			
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項			第Ⅷ因子に準ずる。		
検体採取の特別なタイミング			特記事項なし		
検体の種類		採取管名	内容物	採取量	単位
1	全血	3 黒大	3.2%クエン酸 Na	3.6000000000000001	mL
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件		室温			
検体受入不可基準		1) 採取容器違いの検体 2) 凝固検体 3) 採血量過不足の検体 4) サンプルングできない検体			
保管検体の保存期間		室温・当日中（追加検査については、検査室に要問合せ）			
検査結果・報告					

検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部			
測定時間		当日中			
生物学的基準範囲		0.1 以下 EX 共通 CL1141 : 「臨床検査法提要 改訂第 35 版」			
臨床判断値		設定なし			
基準値				単位	BU/mL
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
パニック値	高値	設定なし			
	低値	設定なし			
生理的変動要因		特記事項なし			
臨床的意義		血液凝固因子である第Ⅷ因子に対する抗体。凝固因子製剤投与中の血友病患者で失活因子となる。 EX 共通 CL1141 : 「臨床検査法提要 改訂第 35 版」 445-446			