

B 細胞表面-κ、λ				3003000	
				担当部署	
kappa				血液	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項			特記事項なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→血液学→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報			非特異反応によって正しい結果が得られない場合がある。		
検査受付時間			8 : 15～16 : 00		
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項			特記事項なし		
検体採取の特別なタイミング			特記事項なし		
検体の種類		採取管名	内容物	採取量	単位
1	全血	1 紫	EDTA-2K	2	mL
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件			室温		
検体受入不可基準			1) 採取容器違いの検体 2) 凝固検体 3) 採血量不足の検体 4) サンプリングできない検体		
保管検体の保存期間			室温・当日中（追加検査については、検査室に要問合せ）		
検査結果・報告					

検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部			
測定時間		当日中			
生物学的基準範囲		kappa:3～8% lambda:1～5% EX 共通 CL1141 : 「臨床検査法提要 改訂第 35 版」1922			
臨床判断値		設定なし			
基準値				単位	%
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
パニック値	高値	設定なし			
	低値	設定なし			
生理的変動要因		特記事項なし			
臨床的意義		L 鎖のκとλは未成熟 B 細胞以後の分化段階における B 細胞のクローン性を区別するのに有用である。成熟 B 細胞性腫瘍については、細胞表面κλ鎖の発現の偏りに注意する。 EX 共通 CL1063 : 「スタンダード フローサイトメトリー」56			