

ヘモグロビン F				423000	
				担当部署	
Hb-F				生化	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項		特記事項なし			
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*1.頻用→			
	2	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→生化学→			
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		特記事項なし			
検査受付時間		8 : 15 ~ 16 : 00			
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項		特記事項なし			
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし			
検体の種類		採取管名	内容物	採取量	単位
1	全血	1 3 灰	フッ化 Na・EDTA	2	mL
2	全血	1 紫	EDTA-2K	2	mL
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
検体搬送条件		室温			
検体受入不可基準		1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)固形物 4)粘性のある検体 5)凝固検体			
保管検体の保存期間		当日保存のみ(追加検査については、検査室に要問合せ)			
検査結果・報告					

検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部				
測定時間		当日中～翌日				
生物学的基準範囲		0.3-1.3% 臨床検査提要 改訂第 35 版 1906				
臨床判断値		設定なし				
基準値					単位	%
共通低値		共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
0		1.3	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
パニック値		高値	設定なし			
		低値	設定なし			
生理的変動要因		特記事項なし				
臨床的意義		成人の正常ヘモグロビンは、2本のα鎖と2本の非α鎖からなる四量体で、HbA0(α2β2)、HbA2(α2δ2)、HbF(α2γ2)の3種類があり、その比率は各々95%以上、3%以下、1%以下である。 β-サラセミアや高ヘモグロビンF血症では5%以上にもなる。遺伝性高胎児ヘモグロビン症はHbFの異常高値を示すが、通常臨床的には全く異常を示さない。 三菱化学メディエンス 検査項目解説 改訂第4版 53				