

FilmArray 呼吸器パネル				8208100	
				担当部署	
呼吸器パネル 2.1				微生物	
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項		該当なし			
オーダリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*7.特殊細菌→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		採取した検体は試験前に遠心分離しない。 PrimeStore® MTM 及び本品のサンプルバッファーにはグアニジン塩が含まれており、漂白剤と反応し、有毒なガスが発生する。また、漂白剤が検体中の微生物や核酸を損傷し、偽陰性結果を引き起こす可能性がある。			
検査受付時間		8 : 45～17 : 00			
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項		該当なし			
検体採取の特別なタイミング		汚染しないよう無菌的に採取する。			
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位	
1 鼻腔	COVID PCR	1ml 生理食塩水			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件		室温 採取後直ちに提出			
検体受入不可基準		1) 検査ラベルがない検体 2) 鼻咽頭ぬぐい液をスワブで採取し、直ちにウイルス輸送培地又は生理食塩液に入れた検体以外の検体 3) 指定容器以外で採取され提出された検体			

		4) 保存・搬送中に容器が破損した検体				
保管検体の保存期間		2 週間（再検査・追加検査は要連絡）				
検査結果・報告						
検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部				
測定時間		当日中				
生物学的基準範囲		陰性（－）				
臨床判断値		該当なし				
基準値					単位	なし
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値	高値	該当なし				
	低値	該当なし				
生理的変動要因		該当なし				
臨床的意義		上気道感染症には鼻炎、咽頭炎、喉頭炎、扁桃炎などが含まれ、それぞれ原因となる微生物が異なる。また、2 類感染症のジフテリアや 5 類感染症の A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎と百日咳も検査の対象となる。その他、Neisseria meningitidis の保菌者検索や、喀痰を得にくい下気道感染者患者、外科的処置（挿管、手術など）や抗菌薬治療による菌交代現象の把握の目的に用いられる。 「臨床微生物検査ハンドブック 第 5 版」				